

CIMENTAGE

STS[®]

FIXATIONS

➔ Système uniquement compatible avec les tiges de Ø08 lg 120 et 170mm

>>> Étape 1

Mesure de la diaphyse humérale :

- Assemblage impacteur d'obturateur 257 334 (gradué) avec gabarits (Ø8, Ø10, Ø12) au choix.



Impacteur d'obturateur

Gabarit


- Permet de déterminer exactement le diamètre et la profondeur du fut huméral.

N.B. : pour les ancillaires Arrow[®], système compatible avec la tige de rétroversion 261 053

>>> Étape 2

Après le choix de la taille de l'implant :

- Assembler l'obturateur (265 776, 265 777 ou 265 778) conformément au diamètre établi précédemment en le vissant sur l'impacteur 257 334.

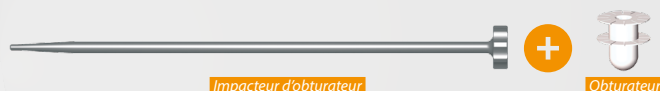


Impacteur d'obturateur

Obturateur

- Introduire dans le canal diaphysaire jusqu'à la hauteur souhaitée, puis dévisser 257 334.

>>> Étape 3

Adapter les centreurs métaphysaires (collerette à ailettes) et diaphysaires tige Ø8

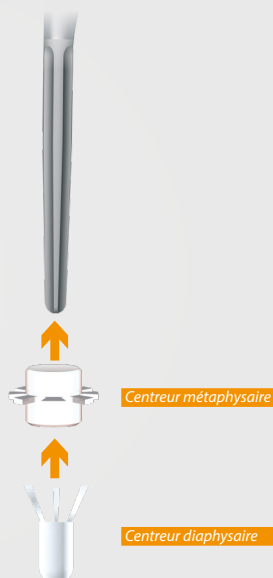


Centreur métaphysaire

Centreur diaphysaire

>>> Étape 4

Tige prête à sceller

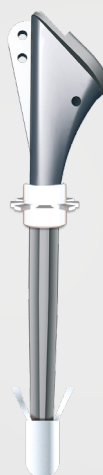

Montage définitif

