




PIED

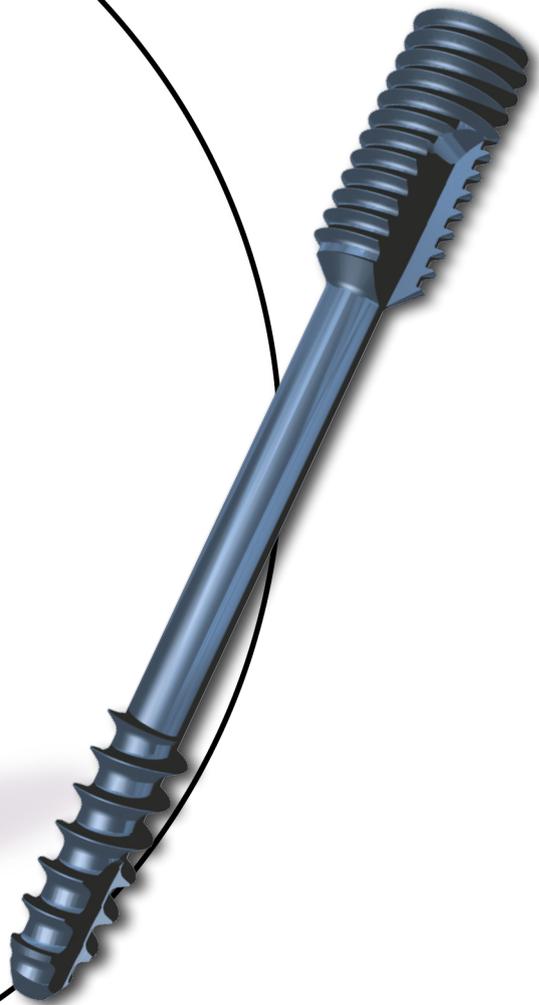

**GAMME DE VIS
POUR OSTÉOSYNTHÈSE DE
L'ARRIÈRE-PIED**



VIS AUTOCOMPRESSIVE POUR OSTÉOSYNTHÈSE DE L'ARRIÈRE-PIED

> La gamme de vis **arrière-pied autocompressive** de la gamme be POD a été conçue pour l'ostéosynthèse de l'arrière-pied, pour un résultat de fixation stable, fiable et facile de réalisation.


> Elle peut être utilisée dans de nombreuses indications:

- Ostéosynthèse arrière-pied, fixation des ostéotomies mono et bi-corticale,
- Stabilisation des fractures diverses (Ex. : calcanéum, astragale...),
- Arthrodèses sous-taliennes, talo-crurales...

> Conçues en alliage de **titane** (TA6V), ces vis sont biocompatibles.

> L'**anodisation** des vis est un facteur d'aide à la mise en place et facilite l'éventuelle ablation du matériel.

> Les vis sont délivrées sous emballage stérile et unitaire, permettant de répondre aux normes les plus rigoureuses de traçabilité.

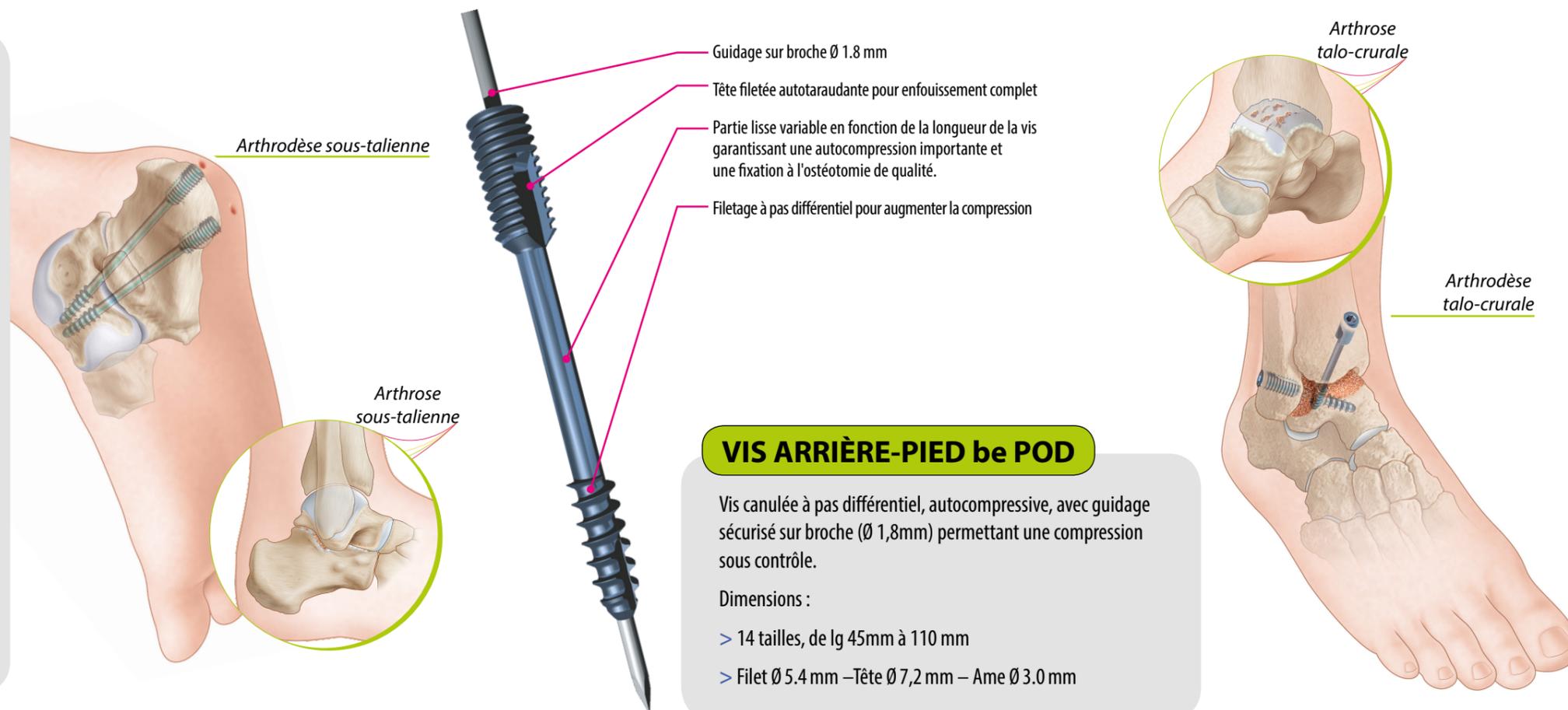

VIS ARRIÈRE-PIED be POD

Vis canulée à pas différentiel, autocompressive, avec guidage sécurisé sur broche (Ø 1,8mm) permettant une compression sous contrôle.

Dimensions :

- > 14 tailles, de lg 45mm à 110 mm
- > Filet Ø 5.4 mm – Tête Ø 7,2 mm – Ame Ø 3.0 mm

ANCILLAIRE - Les étapes

1 Mise en place des broches 255 665 - Broche Ø1,8mm

2 Protection des parties molles 255 664 - Protecteur de parties molles

3 Mesure sur Broche 255 944 - Tube gradué


255 666 - Foret distal Méchage distal

255 667 - Foret proximal Méchage proximal

255 936 - Taraud distal Taraudage distal

255 668 - Taraud proximal Taraudage proximal

255 669 - Tournevis Ø 3.5 mm, plat Fixation

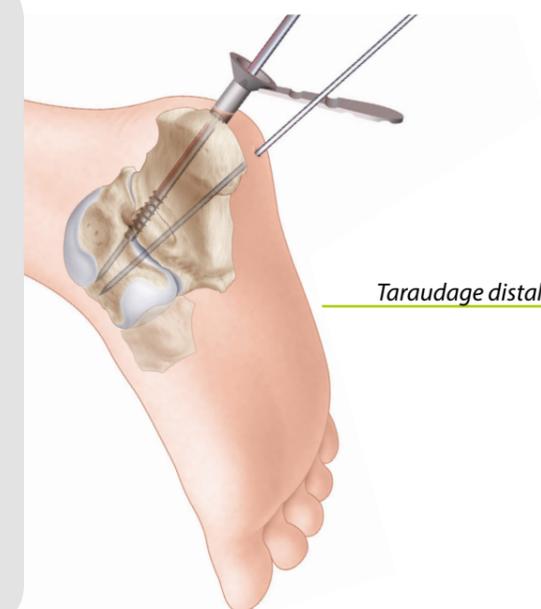


VIS AUTOCOMPRESSIVE ARRIÈRE-PIED



Référence FH	Désignation
255 115	VIS ARRIERE PIED D.7,2MM LG45MM be POD
255 116	VIS ARRIERE PIED D.7,2MM LG50MM be POD
255 117	VIS ARRIERE PIED D.7,2MM LG55MM be POD
255 118	VIS ARRIERE PIED D.7,2MM LG60MM be POD
255 119	VIS ARRIERE PIED D.7,2MM LG65MM be POD
255 120	VIS ARRIERE PIED D.7,2MM LG70MM be POD
255 121	VIS ARRIERE PIED D.7,2MM LG75MM be POD
255 122	VIS ARRIERE PIED D.7,2MM LG80MM be POD
255 123	VIS ARRIERE PIED D.7,2MM LG85MM be POD
255 124	VIS ARRIERE PIED D.7,2MM LG90MM be POD
255 125	VIS ARRIERE PIED D.7,2MM LG95MM be POD
255 126	VIS ARRIERE PIED D.7,2MM LG100MM be POD
255 127	VIS ARRIERE PIED D.7,2MM LG105MM be POD
255 128	VIS ARRIERE PIED D.7,2MM LG110MM be POD

Options

ANCILLAIRE ARRIÈRE-PIED

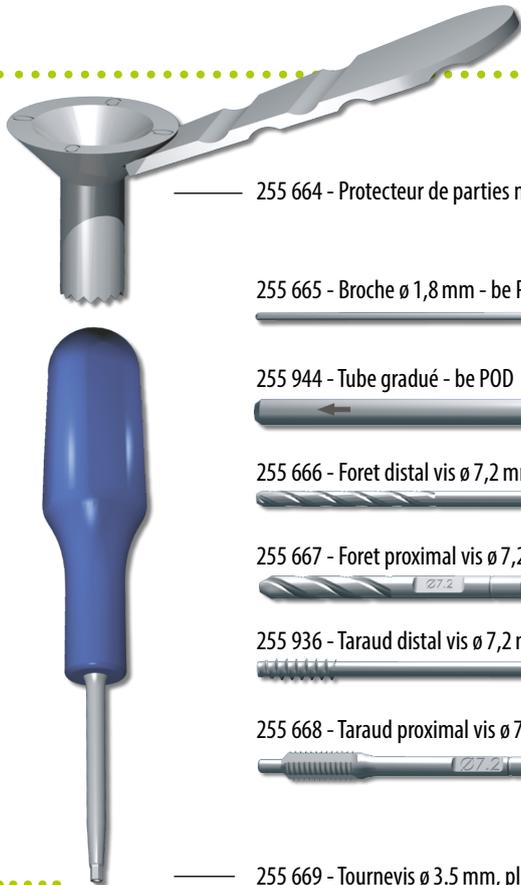

255 664 - Protecteur de parties molles - be POD

255 665 - Broche \varnothing 1,8 mm - be POD

255 944 - Tube gradué - be POD

255 666 - Foret distal vis \varnothing 7,2 mm - be POD

255 667 - Foret proximal vis \varnothing 7,2 mm - be POD

255 936 - Taraud distal vis \varnothing 7,2 mm - be POD

255 668 - Taraud proximal vis \varnothing 7,2 mm - be POD

255 669 - Tournevis \varnothing 3.5 mm, plat - be POD

distribué par :

Date de modification document : novembre 2016 - **Fabricant :** FH Industrie - **Gamme :** Pied - bePOD - **Nom du produit :** Vis bePOD - **Destinataire :** professionnel de santé - **N° du marquage CE :** 0459 - **Classe du DM :** IIb - **Indications :** ostéosynthèse du pied - **Recommandations d'utilisation :** il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit